

Veiligheidswaarschuwing!

Het is voorgekomen dat de gel van AED-elektroden loskomt van de schuimlaag/folie-achterkant wanneer deze van de gele beschermlaag wordt verwijderd.

	<p>NORMALE ELEKTRODE</p> <p>actie: Breng de elektroden aan op de patiënt volgens de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding.</p>
	<p>LOSGELATEN, OMGEVOUWEN GEL KAN ER OOK VERKLEURD EN/OF GESMOLTEN UITZIEN</p> <p>actie: Breng de elektroden aan op de patiënt.</p>
	<p>LOSGELATEN GEL DIE OP ZICHZELF IS GEVOUWEN NA HET VERWIJDEREN VAN DE BESCHERMLAAG</p> <p>actie: Breng de elektroden aan op de patiënt. Aarzel niet.</p>
	<p>DE GEL HEEFT BIJNA VOLLEDIG LOSGELATEN VAN DE ACHTERKANT</p> <p>actie: Vervang de elektrodecassette als een reserveonderdeel beschikbaar is. Als er geen reserveonderdeel beschikbaar is, voert u reanimatie uit totdat er hulp arriveert.</p>

Veiligheidswaarschuwing!

Tot de betrokken producten behoren alle partijen elektrodecassettes voor:

M5071A - volwassenen elektroden voor de HS1 AED
M5072A - baby/kind elektroden voor de HS1 AED

Deze zijn geïnstalleerd in- of opgeslagen als reserveonderdeel bij de HS1 OnSite-/HS1 Home-AED's.

Hoe deze te identificeren:

De nummers bevinden zich op de elektrodecassette, de folieverpakking en/of de doos (**rood omcirkeld**)



M5071A elektrodecassette



M5072A elektrodecassette



M5071A folieverpakking



M5072A folieverpakking



M5072A doos