

Gebruikershandleiding en onderhoudsvorschriften



INHOUD:

1.	Algemene informatie	2
2.	Speciale waarschuwingen en gebruikers instructies	3
3.	Gebruik	3
4.	Gebruik en instellen van accessoires	5
5.	Schoonmaak	8
6.	Onderhoud	9
7.	Problemen oplossen	9
8.	Technische gegevens	10
9.	Modellen overzicht	10
10.	Garantie en voorwaarden	11
11.	Service record	11

1. ALGEMENE INFORMATIE

FABRIKANT

Wesseling BV, Venenweg 31, 1161 AK Zwanenburg, Nederland-Tel.+3120 497 5183 – website: www.wesseling-bv.com

DISTRIBUTEUR

Wesseling Medical Chairs, Venenweg 31, 1161 AK Zwanenburg, Nederland-Tel.+3120 497 5183 - website: www.medicalchairs.nl

BESCHRIJVING DOEL EN GEBRUIK VAN PRODUCT

De Saar kan voor zeer veel doeleinden gebruikt worden, zoals ziekenhuizen, huisartsen, dierenartsen en tandartsen. Het model is zeer compact zodat het in vrijwel iedere ruimte zal passen. De stoelen kunnen worden ingezet voor het (bloed)prikken, vaccineren, zwachtelen, en onderzoeken van personen.

Bij het 2-delige model kunt u kiezen voor een kruisvoet of het PI-onderframe. De kruisvoet wordt standaard geleverd met glijders, het PI-frame is standaard voorzien van 4 afzonderlijk geremde wielen. Het rugdeel is te verstellen door de hendels die aan beide zijden onder het zitdeel zijn verwerkt.

De 3-delige modellen worden allen geleverd op een PI-frame met 4 afzonderlijk geremde wielen. Bij deze stoelen zijn het been- en rugdeel gelijktijdig verstelbaar zijn door de hendels die aan beide zijden onder het zitdeel zijn verwerkt.

Alle stoelen worden standaard geleverd met de set adapters en een set in hoogte verstelbare armsteunen. Deze zijn in een vaste hoek ontworpen zodat de arm(en) van de patiënt goed zijn te positioneren.

De stoelen zijn standaard gestoffeerd in kunstleer van het type Fresh, tevens is er Purfect kunstleer beschikbaar welke te reinigen is met alcohol. De stoffering is gevuld met een zacht maar stevig polyether.




OPSLAG

Wanneer het product wordt opgeslagen, moeten de ruimte aan de volgende voorwaarden voldoen:




Luchtvochtigheid 10% / 90% - temperatuur -10 ° C / + 50 ° C

SYMBOLEN

De verschillende symbolen in deze handleiding en op de apparatuur zelf zijn bedoeld om de aandacht van de gebruiker te vestigen op belangrijke veiligheidswaarschuwingen en nuttige informatie. Houdt u aan alle waarschuwingen en beperkingen en wees bedachtzaam op alle aangekondigde gevaren.

	WAARSCHUWING Waarschuwingssymbolen worden gebruikt om gebruikers/patiënten te adviseren over elk risico van letsel of gevaar indien de opgegeven procedures en voorwaarden niet zorgvuldig tijdens werking of het onderhoud activiteiten niet in acht worden genomen.
	GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK Dit waarschuwingssymbool identificeert dat onderhoud instructies of procedures die, indien niet in acht genomen, kunnen leiden tot het risico van een elektrische schok.
	LET OP Waarschuwing symbolen worden gebruikt om gebruikers te adviseren over gebruik, onderhoud en de toestand van de tafel. Indien deze waarschuwingen niet in acht worden genomen kan dit tot schade leiden aan de apparatuur.

2. SPECIALE WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERS INSTRUCTIES

	<p>Apparatuur mag niet worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zonder de gebruikershandleiding te lezen. • Wanneer de belasting groter is dan de aangegeven capaciteit. • Zonder visueel contact met de patiënt. • Wanneer de patiënt en/of de apparatuur niet stabiel genoeg is. • Wanneer tafel is niet op de poten staat tijdens stilstaan, tijdens de behandeling, of wanneer de patiënt wordt verplaatst naar/van andere apparatuur. • Wanneer er met het oorspronkelijke product is geknoeid en/of aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke configuratie. • Wanneer de besturingselementen en/of onderdelen defect of slechts gedeeltelijk defecte zijn. • Wanneer de tafel/optie niet goed is ingesteld of wanneer men denkt dat het schade kan het toebrengen aan een patiënt of een gebruiker. • Zorg dat er geen lichaamsdelen in de buurt komen van bewegende onderdelen en/of besturingselementen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de tafel niet aan op een elektrische systeem dat niet aan de huidige veiligheidsvoorschriften voldoet. • Zorg dat er geen vloeistoffen van welke aard dan ook op de elektrische apparatuur kunnen morsen. • Ontkoppel altijd de voeding voordat er gewerkt wordt aan de elektrische onderdelen of om de tafel te kunnen verplaatsen. • Breng geen schade toe aan de elektrische kabels: voorkom breken; Trek niet aan de kabels om de snoeren te verwijderen, enz. • Elektrische kabels moeten regelmatig worden gecontroleerd om te zien of ze zijn beschadigd. In geval van twijfel, moeten ze worden vervangen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Schuimrubber en kunststof componenten kunnen branden als ze in contact komen met open vuur. • Bijtende en/of schurende schoonmaakmiddelen kunnen de kappen, doppen en lak beschadigen. • De apparatuur is niet geschikt voor gebruik buitenshuis en/of in oppervlakken die niet vlak genoeg zijn. • UV- en warmte therapie lampen kunnen de bekleding beschadigen.
<p>!!!!!!!!!!!! LAAT DE TAFEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER WANNEER ER EEN PATIËNT OP LIGT/ZIT !!!!!!!!!!</p>	


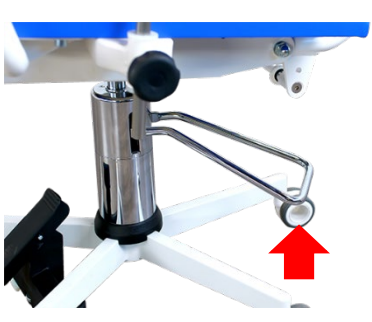


3. GEBRUIK

OPSTARTEN

Voor het vervoeren van de stoel is deze afgedekt met beschermende middelen die moeten worden verwijderd voor gebruik. Zorg ervoor dat scharen en/of messen niet in direct contact komen met het product. Eventuele beschadiging tijdens het vervoer moet onmiddellijk worden gemeld aan de vervoerder en de leverancier, zonder gebruik te maken van de apparatuur om veiligheidsredenen.

INSTELLINGEN EN AANPASSINGEN

Het 2-delige Basic model is leverbaar met kruisvoet en glijdoppen. De 2-delige en 3-delige modellen zijn leverbaar met PI-frame voorzien van afzonderlijk geremde wielen. Een stoel is voorzien van hendels aan beide zijden voor het verstellen van het rug- en/of beendeel. Tevens worden de stoelen geleverd met een set in hoogte verstelbare armsteunen. De diverse instelmogelijkheden worden hieronder uitgelegd.

AANPASSING/FUNCTIE	BEDIENING	PROCEDURE
		<p>Hydraulisch: voor het aanpassen van de hoogte duwt u met de voet op de beugel. Herhaal deze beweging tot de gewenste hoogte is bereikt. Om de stoel weer te laten zakken duwt u de beugel helemaal naar beneden.</p> <p>Bij een stoel met kruisvoet kunt het draaien van de stoel blokkeren door de beugel met de voet omhoog te duwen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>WAARSCHUWING</p>  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Het instellen van de hoogte kan knellingen veroorzaken. Zorg ervoor dat er zich geen personen of materialen onder de stoel bevinden als de hoogte wordt aangepast.




Elektrisch: voor het aanpassen van de hoogte gebruikt u de handschakelaar. Duw op het desbetreffende symbool om de hoogte van de tafel aan te passen. Als u de gewenste hoogte bereikt heeft laat u de betreffende schakelaar los. De Schakelaar is voorzien van een magneet en kan zowel aan de achterzijde als aan de zijkanten worden bevestigd.



WAARSCHUWING



- Het instellen van de hoogte kan knellingen veroorzaken. Zorg ervoor dat er zich geen personen of materialen onder de stoel bevinden als de hoogte wordt aangepast.

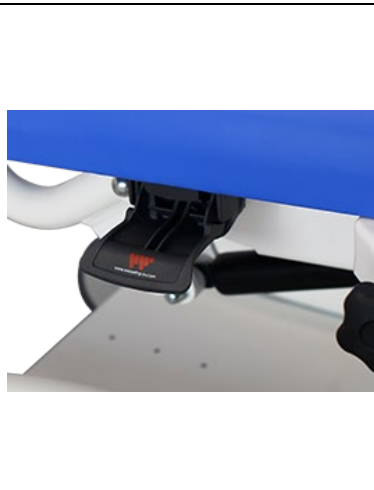


Saar 2-delig: voor het aanpassen van de rugleuning gebruikt u één van de hendels onder het zitdeel. Knijp met 1 hand de bediening in en beweeg met de andere hand het deel in de gewenste richting. Laat de hendel los als de gewenste positie is bereikt. De hendels bevinden zich aan beide zijden onder de zitting van de stoel



WAARSCHUWING



- Als het gewicht van de gebruiker op de leuning rust, activeert u de gasveerhendel alleen indien u zeker weet dat het gehele gewicht wordt ondersteund.
- Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren.

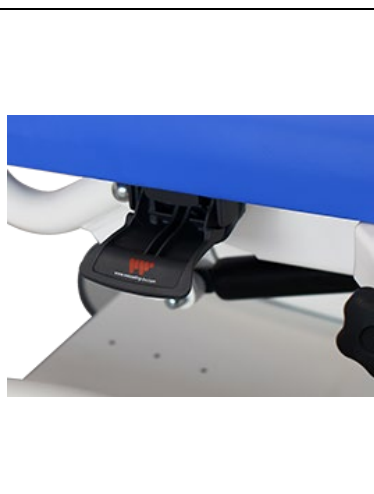


Saar 3-delig: voor het aanpassen van de rugleuning en de beensteun gebruikt u één van de hendels onder het zitdeel. Knijp met 1 hand de bediening in en beweeg met de andere hand het deel in de gewenste richting. Laat de hendel los als de gewenste positie is bereikt. De hendels bevinden zich aan beide zijden onder de zitting van de stoel



WAARSCHUWING



- Als het gewicht van de gebruiker op de leuning rust, activeert u de gasveerhendel alleen indien u zeker weet dat het gehele gewicht wordt ondersteund.
- Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren.

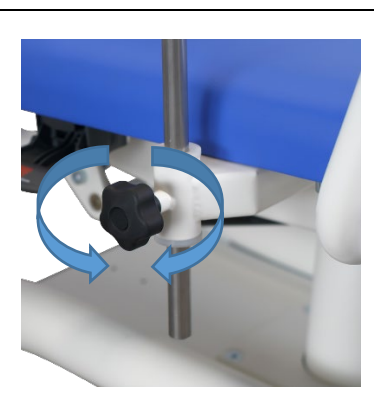

Standaard armsteunen: draai de knop los en breng de steun naar de gewenste hoogte. Draai de knop weer vast om deze hoogte te behouden.




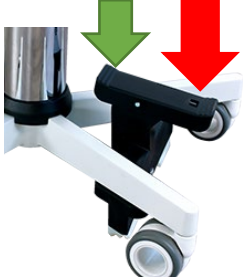




WAARSCHUWING



- Als het gewicht van de gebruiker op de steun rust, draait u de knop alleen los indien u zeker weet dat het gehele gewicht wordt ondersteund.

VERPLAATSEN EN REMMEN

Een stoel met PI frame wordt altijd geleverd met 4 afzonderlijk geremde wielen. Daarnaast is er een optie beschikbaar om de voorwielen centraal te blokkeren











AANPASSING/FUNCTIE	BEDIENING	PROCEDURE
		<p>Kruisvoet: om de wielen te vergrendelen, duwt u de zwarte rem omlaag met uw voet, aangegeven door de rode pijl. Om de wielen los te maken, duwt u de rem weer omhoog aan de achterzijde, aangegeven met de groene pijl</p> <p>WAARSCHUWING</p> <ul style="list-style-type: none"> Om de stoel veilig te kunnen gebruiken moet u er zeker van zijn dan de stoel op de juiste manier geremd is.
		<p>Om de wielen te blokkeren duwt u met de voet de rode rem naar beneden. Om de wielen vrij te geven duwt u van onderen de rode knop weer naar boven.</p> <p>WAARSCHUWING</p> <ul style="list-style-type: none"> Om de stoel veilig te kunnen gebruiken dient u tijdens het behandelen alle wielen te blokkeren.
		<p>Heeft u gekozen voor centraal geremde voorwielen dan zijn deze als volgt te blokkeren en vrij te geven.</p> <ul style="list-style-type: none"> Duw aan de kant van de rode dop de beugel naar beneden om beide wielen te blokkeren. Duw aan de kant van de groene dop de beugel naar beneden om beide wielen te vrij te geven. <p>WAARSCHUWING</p> <ul style="list-style-type: none"> Om de stoel veilig te kunnen gebruiken dient u tijdens het behandelen alle wielen te blokkeren.
WAARSCHUWING		
<p>Het is essentieel om alle wielen te blokkeren tijdens het plaats nemen/uit stappen/behandelen van patiënten.</p>		

4. GEBRUIK EN INSTELLEN VAN DE OPTIES

Door de stoel uit te rusten met verschillende opties kunt u het gebruiksgemak en het patiëntencomfort verhogen.

ACCESSOIRES	BEDIENING	PROCEDURE
<p>ACS001: Centraal geremde voorwielen</p> 		<p>Heeft u gekozen voor centraal geremde voorwielen dan zijn deze als volgt te blokkeren en vrij te geven.</p> <ul style="list-style-type: none"> Duw aan de kant van de rode dop de beugel naar beneden om beide wielen te blokkeren. Duw aan de kant van de groene dop de beugel naar beneden om beide wielen te vrij te geven.

<p>ACS002: Set verstelbare armsteunen</p> 		<p>Deze PU armsteunen zijn in elke hoek te verstellen. Door aan de kogelknop aan de onderzijde te draaien kunt de gewenste hoek in stellen. Daarnaast zijn de steunen in hoogte te verstellen door de sterknop aan de zijkant te gebuiken. De armlegger zelf is 350x115mm groot en is ergonomisch gevormd.</p>
		<p>Om elke patiënt veilig en comfortabel te laten plaatsnemen en op te staan, zijn de sta-op steunen onmisbaar. Ze zijn gemaakt in dezelfde kleur als het frame dus het vormt een mooi geheel. De steunen zijn rond afgewerkt en zijn dus zeer prettig in het gebruik.</p>
		<p>De papierrolhouder wordt aan de achterzijde van het rugdeel bevestigd en is geschikt voor rollen tot 50cm. De rollen zijn zeer eenvoudig te plaatsen door ze over de stang heen te schuiven.</p>
<p>ACS005: Nekkussen met klittenband</p> 		<p>Het nekkussen is 30cm breed en heeft een hoogte van 9cm. De elastische band wordt door klittenband aan de achterzijde vastgemaakt en kan daardoor op iedere gewenste hoogte worden gebruikt. Hierdoor is het kussen ook als lendesteun te gebruiken. Het kussen kan in kleur naar keuze worden gemaakt en kan zodoende ook in de kleur van de stoel of juist afwijkende worden gestoffeerd.</p>

		<p>Een set rvs DIN-rails naast het zitdeel waardoor het mogelijk wordt om diverse opties en accessoires te gebruiken in combinatie met de railklemmen. De rail heeft de standaard maat van 25x10mm en een lengte van 40cm.</p> <p>Als u kiest voor de DIN-rail vervallen de adapters voor de standaard priksteunen. Deze zijn nog steeds te gebruiken in combinatie met de klemmen.</p>
		<p>Deze rvs klem is voorzien van een snelspangreep en is niet draaibaar. Er kunnen accessoires met een paaldiameter van 16–20 mm worden gebruikt. De accessoireklem is eenvoudig te monteren door de klem vanaf de bovenzijde in de accessoirerail te haken en vervolgens te vergrendelen door de spangreep opzij te duwen.</p>
		<p>Deze rvs klem is voorzien van een snelspangreep en is draaibaar. Er kunnen accessoires met een paaldiameter van 16–20 mm worden gebruikt. Doordat de klem draaibaar is kunnen accessoires ook in verschillende hoeken worden gebruikt. De accessoireklem is eenvoudig te monteren door de klem vanaf de bovenzijde in de accessoirerail te haken en vervolgens te vergrendelen door de spangreep opzij te duwen.</p>
		<p>Deze beensteun is alleen te gebruiken in combinatie met de DIN-rail en een railklem. Door bijvoorbeeld de draaibare klem te kiezen kan de steun worden gebruikt voor het zwachtelen van het onderbeen.</p>
		<p>De speciale wielen met open-center zorgen ervoor dat er geen vuil in het wiel blijft hangen. Door de unieke voetrem is de stoel zeer stabiel en blijft deze goed op de positie tijdens de behandeling. De rem steekt niet uit en zorgt dus niet voor gevaarlijk situaties, maar is desondanks toch makkelijk te bereiken.</p>

		<p>Purfect bekleding voor krukjes/kussens, desinfecteerbaar met alcohol.</p>
<p>PURFECT02 – [KLEUR]: Purfect voor Complete stoel</p> 		<p>Purfect bekleding voor complete stoel, desinfecteerbaar met alcohol.</p>

5. SCHOONMAAK

Om de bekleding een langere levensduur te geven dient de tafel regelmatig schoon gemaakt te worden. Bij het schoonmaken wordt er onderscheid gemaakt tussen kunstleer op basis van PVC (met weekmakers) en PU.

PVC kunstleer: gebruik een doek of een zachte borstel met water en een neutraal reinigingsmiddel voor het reinigen. Vlekken op de bekleding moeten onmiddellijk worden verwijderd met kleurloze ethylalcohol verdund in 20% water. Goed naspoeien en drogen.

PU kunstleer: gebruik een doek of een zachte borstel met een reinigingsmiddel verdund tot 70% in water voor het reinigen. Goed naspoeien en drogen.

Kijk voor een uitgebreide lijst met schoonmaak middelen op www.medicalchairs.com



WAARSCHUWING



- AGRESSIEVE REINIGSMIDDELEN KUNNEN SCHADE TOEBRENGEN AAN DE OPPERVLAKKEN.
- GEBRUIK GEEN STOOM JETS, WASTUNNELS, OF HOGEDRUK REINIGERS

6. ONDERHOUD

Onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door technici die vertrouwd zijn met de inhoud van deze gebruiksaanwijzing. Controleer altijd of de apparatuur veilig is na "ruwe behandeling" (bijvoorbeeld val, hobbels, enz.) en elk moment dat u twijfelt over de veiligheid.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Preventief onderhoud moet worden uitgevoerd met de frequentie die in de tabel is aangegeven.

FREQUENTIE	PROCEDURE
Ten minste eenmaal per jaar	Algemene schoonmaak apparatuur.
	Visuele en functionele inspectie van de uitrusting en verwante hydraulische en handmatige besturingselementen.
	Frame en mechanische onderdelen: Controleer of schroeven en bouten vast zitten; aanwezigheid van scheuren en vervormingen of schade.
	Gasveer mag alleen olie vertonen in de vorm van smeerolie op de zuigerstang. Overtollige olie kan duiden op lekkage.
	Controleer of de verstelbare secties stabiel zijn en niet meegeven wanneer de bedieningshendels niet worden bediend.
	Wielen: De rollen moeten soepel lopen en loopvlakken moet vrij zijn van eventuele belemmeringen, vuil of schade. De kruk moet stabiel zijn als deze op alle wielen staat

CORRECTIEF ONDERHOUD

Om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat de garantie ongeldig wordt verklaart, kan geen onderdeel worden geopend of behandeld voor reparatie.



WAARSCHUWING



- EVENUTELE GEBREKEN, SCHADES EN ONDERHOUDSBEURTEN DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE VEILIGHEID MOETEN WORDEN GEREgistREED IN HET BIJGESLOTEN FORMULIER.

RESERVEONDERDELEN

Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Wesseling Medical Chairs. Neem contact op met Wesseling Medical Chairs voor de onderdelen die u wellicht nodig heeft

7. PROBLEMEN OPLOSSEN

DIRECTE E-MAIL VOOR TECHNISCHE- OF GEBRUIKERS ONDERSTEUNING:

info@medicalchairs.nl

Als u liever met een van ons wilt spreken via de telefoon kunt u bellen op: +31(0)20 497 5183

Let op:

- Voordat u contact opneemt voor service of ondersteuning, dient u het "serienummer" te noteren. Dit nummer vindt u in het productlabel gekoppeld aan de apparatuur. Dit zal de dienstverlening versnellen en verbeteren.

De apparatuur werd getest naar aanleiding van zeer strenge voorwaarden. Tijdens de test zijn geen specifieke breuken of fouten opgetreden. Indien de apparatuur niet werkt, volg dan onderstaande probleemoplossingsproces.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Hydraulisch instellen van de hoogte werkt niet of positie kan niet worden behouden.	Pomp defect	Neem contact op met Wesseling Medical Chairs
Elektrisch Instellen van de hoogte werkt niet of positie kan niet worden behouden.	Netsnoer/schakelaar niet goed aangesloten	Controleer de aansluitingen
	Netsnoer/kabel schakelaar beschadigd	Neem contact op met Wesseling Medical Chairs
	Motor defect	Neem contact op met Wesseling Medical Chairs
Kruk is slecht te verplaatsen	Wiel(en) beschadigd	Controleer het loopvlak van de wielen op eventuele schade of vuil
	Wielen niet vrij gegeven	Controleer of alle wielen juist zijn vrij gegeven.
Instellen van de rugleuning werkt niet of positie kan niet worden behouden.	Hendel/kabel beschadigd	Neem contact op met Wesseling Medical Chairs

8. TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	Saar 2-delig / Saar 3-delig						
Product code	SAARK2H12	SAARP2F12	SAARP2H12	SAARP2E12	SAARP3F12	SAARP3H12	SAARP3E12
Hoogte (cm)	46,5 – 63,5	47cm	47 – 64cm	52 – 77cm	47cm	47 – 64cm	52 – 77cm
Max. belasting(kg)	150	175	175	175	175	175	175
Verstelling	Hydraulisch	Vaste hoogte	Hydraulisch	Elektrisch	Vaste hoogte	Hydraulisch	Elektrisch
Verstelsysteem	Trapbeugel	-	Trapbeugel	Handschakelaar	-	Trapbeugel	Handschakelaar
Verstellen rug/been	Gasveerhendels aan beide zijden onder zitvlak						
Wielen	Glijdoppen	Dubbelrol zwenkwiel met rem, Ø100mm					
Gewicht product(kg)	40	45	50	50	55	55	60
Rugdeel	72x49cm						
Zitting	52x49cm						
Beendeel	-				33x49cm		
Dikte polstering	60mm						
Materiaal	Kunstleer Fresh, Purfect of Stamskin TOP						
Armsteunen	RVS staander met PU armlegger, in hoogte verstelbaar, draaibaar						
Onderstel	Staal, mat wit						

9. MODEL OVERZICHT



10. GARANTIE EN VOORWAARDEN

ALGEMENE AFTER-SALES SERVICE VOORWAARDEN VOOR WESSELING MEDICAL CHAIRS-ITEMS

De garantie heeft een geldigheid van 24 maanden vanaf de datum van levering.

De garantie dekt geen verbruiksgoederen, oplaadbare batterijen en over het algemeen al het materiaal onderworpen aan slijtage, storingen veroorzaakt door stoten, waterschade, misbruik of onjuist gebruik, toevallige gebeurtenissen en transportschade. De garantie zal automatisch ongeldig worden gemaakt als er met de apparatuur is geknoeid.

Reparatie van de apparatuur zal worden uitgevoerd specialisten en moet worden gemeld aan de verdeler.

Schatting moet specifiek worden aangevraagd.

Betaling is vooraf, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Voor elk geschil bedraagt de enige bevoegde gerecht de rechtbank te Amsterdam

REPARATIES BINNEN DE GARANTIE

Reparaties buiten de garantie moeten uitdrukkelijk worden aangevraagd.

Herstelwerkzaamheden onder garantie zal worden uitgevoerd in onze werkplaats en van de vergunning

De retourverzending voor producten die worden verzonden in hun originele verpakking zullen kosteloos worden gemaakt.

Een fiscaal document (factuur van de verkoop, factuur of contanten aankoop bon) is vereist voor een garantieclaim; de aankoopdatum aangegeven op de bon bepaalt of de claim binnen de garantie periode is of niet.

Indien bij inspectie, het product volledig blijkt te functioneren, worden de uitgaven alsnog in rekening gebracht aan de cliënt.

REPARATIES BUITEN DE GARANTIE

Voor reparaties buiten de garantie uitgevoerd in de fabriek, wordt transportkosten doorberekend aan de klant.

De garantie op de onderdelen die worden vervangen tijdens de herstelwerkzaamheden is 12 maanden vanaf het moment dat de apparatuur wordt geplaatst.

Indien bij inspectie, het product volledig blijkt te functioneren, worden de uitgaven alsnog in rekening gebracht aan de cliënt.

REPARATIES THUIS GEMAAKT

In het geval dat reparaties moeten worden gemaakt bij de klant thuis, is een schriftelijk verzoek nodig met daarin de gegevens van de monteur, de gegevens van het product en details van het defect.

De kosten per kilometer en arbeidsloon van de technicus die op locatie komt zal van te voren worden overeengekomen met de klant.

Tijd en kilometers worden berekend vanaf het moment dat de technicus onze werkplaats verlaat totdat hij/zij terugkeert.

VERKOOP VAN RESERVEONDERDELEN EN VERBRUIKSGOEDEREN

Orders moeten schriftelijk worden door gegeven met daarin het item, de verzendwijze en de gegevens van de klant.

De volgorde van verwerkingstijd kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal.

Reserve onderdelen kunnen niet worden geretourneerd.

11. SERVICE RECORD

PRODUCT:		DATUM INSTALLATIE:		GARANTIENUMMER:	
SERVICE DATUM	UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:	NAAM MONTEUR:	HANDTEKENING	VOLGENDE DATUM	